

Påtagning af Biogel® Indicator® dobbelthandske systemer

ÅBEN påtagning

Ifør dig den sterile kittel og åben yder- og inderemballagen¹ som anbefalet.



1 Tag den første farvede handske ud af inderemballagen med din ikke dominante hånd. Placer tommel- og pegefingern på din anden hånd på folden af det ombukkede handskeskaft på højde med handskens håndflade og træk handsken over hånden. Behold handskeskaftet ombukket.



2 Tag den anden farvede handske ud af emballagen ved at tage fat med dine behandskede fingre under det ombukkede handskeskaft. Med strakt arm og let bøjet albue, føres den ubehandskede hånd ind i handsken.



3 Træk handsken op over kitlens vævede manchete ved at vrikke armen frem og tilbage med små bevægelser.



4 Træk handsken helt på plads. Sørg for at handsken dækker kitlens vævede manchete fuldstændigt med en margin på ca. 10 cm.



5 Følg samme procedure til at tage den anden handske på.



6 Åben inderemballagen med de stråfarvede yderhandsker. Før fingrene i den grønne inderhandske på den ene hånd ind i den ene yderhandske. Stræk handsken til den føles behagelig at have på.




7 Træk handsken helt på plads, og gentag proceduren med den anden yderhandske.



8 Sørg for at yderhandsken er trukket godt op over inderhandsken (ca. 2,5 cm) for at undgå at den ruller eller glider ned.

Udskiftning af kontamineret/perforeret handske under operation

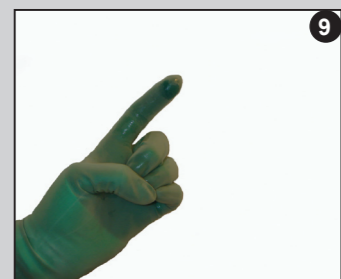

9 Med Biogel punkturindikationssystemet vil der, hvis der opstår handskepunktur, hvor der er væske tilstede, forekomme en mørk plet på yderhandsken på det sted, hvor punkturen optræder.



10 Udskift en kontamineret handske under operationen ved at fjerne yderhandsken ved at trække handskeskaftet ned over hånden, så handsken vender vrangen udad. Smid handsken væk.



11 Kontroller inderhandsken for punktur. Er der handskepunktur, tages handsken af og udskiftes i henhold til de lokale forskrifter. Ellers tørres handsken af med en steril serviet.

Åbn en ny pakke med den rette type Biogel yderhandsker for at sikre, at Biogel punkturindikationssystemet virker efter hensigten. Tag den nye yderhandske på som vist i pkt. 14 & 15 og sørg for, at skaftet på den er trukket godt op over inderhandsken (ca. 2,5 cm) for at undgå, at den ruller eller glider ned.

Reference: ¹ Folin A. Udpakning af Indicator-dobelthandskesystem. En Sikker Hånd 2/2009. Mölnlycke Health Care AB.

Biogel®

SETTING THE STANDARD IN PROTECTION