

Påtagning af Biogel® Indicator® dobbelthandske systemer

LUKKET påtagning med manchetterne i hænderne

Ifør dig den sterile kittel og åben yder- og inderemballagen ¹ som anbefalet.



1 Stræk ikke hænderne gennem ærmernes manchetter. Hold manchetterne i hænderne som vist på billedet.



2 Yderemballagen åbnes af sygeplejersken med gulvfunktion. Tag inderemballagen med hænderne helt dækket af kittlens ærmer.



3 Læg inderemballagen på sterilt underlag, så handskenes fingre peger mod dig.



4 Åben inderemballagen (de farvede handske), mens du sørger for at holde hænderne helt dækket af kittlens ærmer.



5 Tag den første handske med din dominerende hånd (den højre handske med din højre hånd eller den venstre handske med din venstre hånd).



6 Vip handsken forsigtigt bagover, så den hviler på din venstre eller højre underarm. Handskens tommelfinger er nu ud for din egen tommelfinger.



7 Brug din anden hånd, som stadig er inde i kittelærmet...



8 ... og træk kanten af handsken over din håndryg.



9 Træk handsken op over kittlens manchete ved at vrikke fingrene frem og tilbage med små bevægelser.



10 Handsken er nu helt på plads. Sørg for, at handsken altid dækker kittlens vævede manchete fuldstændigt.



11 Tag den anden handske op med den ubehandskede hånd, på samme måde som ved den første handske.



12 Brug din behandskede hånd til at trække kanten af handsken over bagsiden af din anden hånd



13 Vrik med dine fingre og træk handsken op over din hånd som før indtil den er helt på plads.




14 Tag yderhandskerne på.



15 Sørg for at yderhandsken er trukket godt op over inderhandsken (ca. 2,5 cm) for at undgå at den ruller eller glider ned.

Udskiftning af kontamineret/perforeret handske under operation

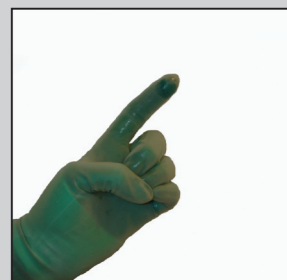

16 Med Biogel punkturindikationssystemet vil der, hvis der opstår handskepunktur, hvor der er væske tilstede, forekomme en mørk plet på yderhandsken på det sted, hvor punkturen optræder.



17 Udskift en kontamineret handske under operationen ved at fjerne yderhandsken ved at trække handskeskaftet ned over hånden, så handsken vender vrangen udad. Smid handsken væk.



18 Kontroller inderhandsken for punktur. Er der handskepunktur, tages handsken af og udskiftes i henhold til de lokale forskrifter. Ellers tørres handsken af med en steril serviet.

Åbn en ny pakke med den rette type Biogel yderhandske for at sikre, at Biogel punkturindikationssystemet virker efter hensigten. Tag den nye yderhandske på som vist i pkt. 14 & 15 og sørg for, at skaftet på den er trukket godt op over inderhandsken (ca. 2,5 cm) for at undgå, at den ruller eller glider ned.

Reference: ¹ Folin A. Udpakning af Indicator-dobelthandskesystem. En Sikker Hånd 2/2009. Mölnlycke Health Care AB.

 **Biogel®**

SETTING THE STANDARD IN PROTECTION