



Påtagningssguide: Operationsmaske med øreelastik

- A. Dæk næse og mund med masken, mens du holder i øreelastikkerne. Næseklemmen skal være øverst.
- B. Placer elastikkerne omkring ørerne. Træk i masken for at folde den helt ud. Dette sikrer, at ansigtet dækkes bedst muligt og samtidig minimeres antallet af lag, du skal ånde gennem.
- C. Form næseklemmen over næsen.
- D. Hår og ører skal dækkes med en passende hue for at minimere spredningen af hår og andre partikler. Hvis der er risiko for væskestænk, skal du anvende en 4-lags stænkresistent maske samt beskyttende briller eller en stænkresistent maske med visir. Skift maske, når den er kontamineret samt mellem hver operation.
- E. Smid masken væk efter brug.