



Påtagingsguide: Operationsmaske med bindebånd

- A. Form næseklemmen. Placer masken for ansigtet. Sørg for at dække næse og mund.
- B. Placer det øverste bindebånd på toppen af hovedet og bind det stramt.
- C. Træk det nederste bindebånd rundt om nakken og bind det stramt.
- D. Fold altid masken helt ud for at minimere antallet af lag, du skal ånde gennem.
- E. Skift maske, når den er kontamineret samt mellem hver operation.
- F. Hvis der er risiko for væskestænk, skal du enten anvende en 4-lags stænkresistent maske samt beskyttende briller eller en 4-lags stænkresistent maske med et visir.
- G. Smid masken væk efter brug.

BARRIER
NO COMPROMISE IN SECURITY