



Påtagningssguide: Operationsmaske med visir

Hvis der er risiko for væskestænk, skal du altid bruge enten en 4-lags stænkresistent maske med visir eller en 4-lags stænkresistent maske samt beskyttende briller.

- A. Før du tager masken på, skal visiret foldes langs siderne for at opnå optimal beskyttelse fra stænk fra siden, der kan komme i kontakt med øjnene.
- B. Form næseklemmen.
- C. Fold masken helt ud ved at trække i top og bund.
- D. Placer masken på dit ansigt. Sørg for at dække næse og mund.
- E. Placer det øverste bindebånd på toppen af hovedet og bind det stramt.
- F. Placer det nederste bindebånd rundt om nakken og bind det stramt.
- G. Fold altid masken helt ud for at minimere antallet af lag, du skal ånde gennem.
- H. Skift maske, hvis den er kontamineret samt mellem hver operation.
- I. Smid masken væk efter brug.

BARRIER
NO COMPROMISE IN SECURITY