

Udpakning af Biogel® handskepakninger

“Holdeteknikken”

Der findes forskellige grundlæggende teknikker til udpakning af sterile, kirurgiske handsker. Der er flere grunde til, at udpakningsteknikkerne varierer:

- enkelt eller dobbelt pakning af handskerne
- pakningens udformning og foldning
- de forskellige materialer, der anvendes til pakning af både inder- og yderhandske
- den teknik, der bruges ved påtagning af handskerne (åben eller lukket påtagning med manchetterne i hænderne eller fremme¹)

Sørg for at yderemballagens kanter ikke kommer i kontakt med inderemballagen samt at inderemballagen ikke rører varmeksejlingen på yderemballagens indre kanter. Dette gøres for at sikre inderemballagens/-emballagernes sterilitet.

Åbning af pakningen (udført af en usteril person)




1 Tag fat i pakningens øverste, korte side. Undersøg pakningen, og ryst den om nødvendigt let for at sikre, at inderemballagen ligger midt i pakningen for at undgå, at inderemballagen falder ud på varmeksejlingen, når yderemballagen åbnes.




2 Træk inderemballagens sider fra hinanden. Start med det øvre hjørne længst væk fra dig selv.



3 Fortsæt med det øvre hjørne tættest på dig.

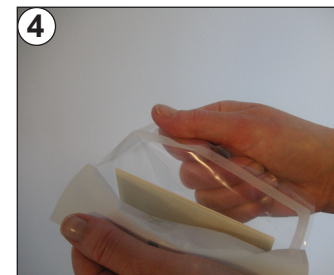

4 Tag godt fat med begge hænder på hver side af pakningen, så yderemballagens lange sider kan trækkes lidt fra hinanden.

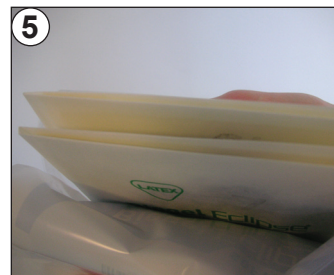

5 Pres begge hænder sammen, så de to inderemballager tvinges fra hinanden.



7 Når man tager handske 1, skal man sørge for, at hænderne ikke kontaminerer handske 2, som stadig ligger i yderemballagen, mens det første par handsker tages på. Imens sikrer den assisterende sygeplejerske, at den inderemballage, der ligger i yderemballagen, holdes steril.



9 Åben inderemballage 1 helt, og sørg for, at de desinficerede hænder ikke kontamineres. Tag de farvede inderhandsker på.



6 Ved åben påtagning tager man fat i inderhandskens indpakning, handske 1 i Indicator-handske systemet, i den øverste, korte ende. Sørg for, at den assisterende sygeplejerske vender den rigtige ende af pakningen mod den person, der skal have handskerne på.



8 Flyt hænderne til inderemballagens nederste, korte ende, og læg inderemballage 1 et tørt og rent sted. Sørg for, at ca. 5 cm af pakningens nederste ende er fri af bordet, så der kan tages fat i den, og inderemballagen kan pakkes op uden risiko for kontaminering af de desinficerede hænder.



10 Tag inderemballage 2 hos den assisterende sygeplejerske, og tag yderhandskerne ud. Tag handskerne på som anbefalet¹.

Reference: ¹ Folin A. Påtagning af Indicator Dobbelthandske Systemer. *En Sikker Hånd* 1/2010. Mölnlycke Health Care AB.

 **Biogel®**

SETTING THE STANDARD IN PROTECTION