

# Udpakning af Biogel® handskepakninger

## “Læggeteknikken”

Der findes forskellige grundlæggende teknikker til udpakning af sterile, kirurgiske handsker. Der er flere grunde til, at udpakningsteknikkerne varierer:

- enkelt eller dobbelt pakning af handskerne
- pakningens udformning og foldning
- de forskellige materialer, der anvendes til pakning af både inder- og yderhandske
- den teknik, der bruges ved påtagning af handskerne (åben eller lukket påtagning med manchetterne i hænderne eller fremme<sup>1</sup>)

Sørg for at yderemballagens kanter ikke kommer i kontakt med inderemballagen samt at inderemballagen ikke rører varmekseglingen på yderemballagens indre kanter. Dette gøres for at sikre inderemballagens/-emballagernes sterilitet.

### Åbning af pakningen (udført af en usteril person)




1 Tag fat i pakningens øverste, korte side. Undersøg pakningen, og ryst den om nødvendigt let for at sikre, at inderemballagen ligger midt i pakningen for at undgå, at inderemballagen falder ud på varmekseglingen, når yderemballagen åbnes.



2 Træk inderemballagens sider fra hinanden. Start med det øvre hjørne længst væk fra dig selv.



3 Fortsæt med det øvre hjørne tættest på dig.

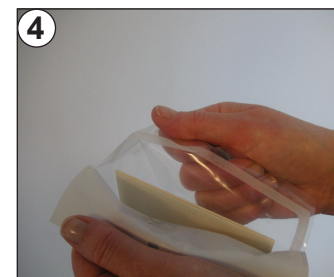

4 Tag godt fat med begge hænder på hver side af pakningen, så yderemballagens lange sider kan trækkes lidt fra hinanden.




5 Nu kan pakningen med handskerne enten lægges på et bord og åbnes der, eller åbnes, mens man holder den frem for sig som på billede 4.



6 Tag fat i både handskepakning 1 og 2 i Indicator-handskesystemet i den nederste ende for at sikre, at hænderne ikke bliver kontaminerede, da den sterile kant i pakningens top er ret kort.



7 Adskil de to pakninger og læg dem ned hver for sig på et rent og tørt sted. Sørg for, at ca. 5 cm. af pakningens nederste ende er fri af bordet, så der kan tages fat i den, og inderemballagen kan pakkes op uden risiko for kontaminering af de desinficerede hænder.

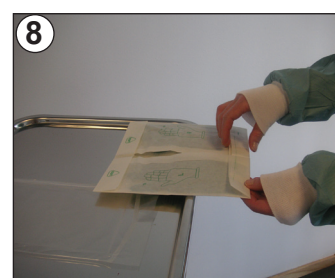

8 Åbn de to inderemballager helt, så det ikke bliver nødvendigt at røre papiremballagen igen. Sørg for, at dine desinficerede hænder ikke kontamineres. Tag handskerne på som anbefalet<sup>1</sup>.

Reference: <sup>1</sup> Folin A. Påtagning af Indicator Dobbelthandske Systemer. *En Sikker Hånd* 1/2010. Mölnlycke Health Care AB.

 **Biogel**®

SETTING THE STANDARD IN PROTECTION

 **MÖLNLYCKE**  
HEALTH CARE

CE indehaver: Mölnlycke Health Care AB, Gamlestadvägen 3 C, SE-402 52 Göteborg, Sweden. Mölnlycke Health Care and Biogel® navne og logoer er varemærker, der tilhører Mölnlycke Health Care Group of companies. www.molnlycke.dk. Copyright 2011.